



ESR

Control

Para uso no controle de qualidade no teste de velocidade de hemossedimentação (VHS)

APLICAÇÕES

ESR Control está desenhado para ser utilizado no controle de qualidade na medição da velocidade de hemossedimentação em analisadores automáticos.

Consultar o valor estabelecido nas etiquetas de ambos os níveis, visto que o mesmo varia de acordo com o lote.

REAGENTES FORNECIDOS

Control Level 1: suspensão estabilizada em tampão de eritrócitos humanos em níveis normais ou próximos aos normais, com conservantes apropriados.

Control Level 2: suspensão estabilizada em tampão de eritrócitos humanos em níveis patológicos, com conservantes apropriados.

INSTRUÇÕES DE USO

Control Level 1 e 2: prontos para uso.

PRECAUÇÕES

Os Controles são para uso diagnóstico "in vitro".

ESR Control foi preparado a partir de material não reativo para antígeno de superfície de Hepatite B (HBsAg), anticorpos contra o vírus da Hepatite C (HCV) e da Imunodeficiência Humana (VIH). No entanto, o reagente e todas as amostras devem-se manipular como se tratando de material infectante. Utilizar os reagentes observando as precauções habituais de trabalho no laboratório de análise clínica.

Todos os reagentes e as amostras devem-se descartar conforme à regulação local vigente.

ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ESR Control é estável à temperatura ambiente (18-30°C) até a data de vencimento indicada na embalagem. Não congele ou exponha a altas temperaturas.

Depois de aberto, é estável 31 dias à temperatura ambiente (18-30°C), mantendo os frascos bem fechados. Evite a exposição prolongada de frascos abertos à luz. Os frascos devem ser mantidos bem fechados após o uso para evitar a evaporação.

PROCEDIMENTO

Os controles devem ser usados da mesma forma que uma amostra desconhecida, de acordo com as instruções que acompanham o instrumento ou kit.

1- Este produto deve ser preparado com um novo tubo a cada vez.

2- Role o frasco entre as palmas das mãos na posição horizontal e invertida por 20 a 30 segundos. Ocasionalmente, inverta o frasco. Misture sem agitar. Evite a formação de espuma.

3- Repita o passo 2 até que uma suspensão completa seja obtida. Os frascos armazenados a longo prazo requerem uma mistura mais extensa.

4- Inverta suavemente o frasco 10-12 vezes.

5- Assegure-se que todo o conteúdo do frasco esteja em suspensão. Caso não seja assim, repita os passos 3 a 5 até obter suspensão total.

6- Siga as instruções do fabricante para encher os tubos de amostra. O procedimento de Westergren clássico não requer pré-diluição do material de controle. Tampe imediatamente e execute como um controle.

7- Após cada uso, limpe qualquer material residual das roscas do frasco e da tampa interna. Armazene conforme descrito em ESTABILIDADE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.

VALORES ESPERADOS

Os valores são assinados em analisadores apropriadamente mantidos e calibrados pelo fabricante.

As médias de cada laboratório devem estar dentro da faixa aceitável correspondente, mas podem divergir dos valores indicados ao longo da vida útil do produto.

Variações ao longo do tempo e entre laboratórios podem ser devidas a diferenças na técnica laboratorial, método de calibração do instrumento e reagentes. Recomenda-se que cada laboratório estabeleça seus próprios valores e faixas aceitáveis e use os fornecidos apenas como guias.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

- Não use após a data de validade.
- Este produto não foi desenhado para ser usado como padrão.
- Puede observarse un aspecto atípico del reactivo. Si los valores obtenidos no se encuentran dentro de los rangos esperados, repetir el análisis con un nuevo frasco del reactivo.

APRESENTAÇÃO

- 2 x 9 ml: 1 x 9 ml Level 1 + 1 x 9 ml Level 2 (Cód. 1937601)

Símbolos

Os seguintes símbolos são utilizados nos kits de reagentes para diagnóstico da Wiener lab.



Este produto preenche os requisitos da Diretiva Europeia 98/79 CE para dispositivos médicos de diagnóstico "in vitro"



Elaborado por:



Representante autorizado na Comunidade Europeia



Nocivo



Uso médico-diagnóstico "in vitro"



Corrosivo / Caústico



Conteúdo suficiente para <n> testes



Irritante



Data de validade



Consultar as instruções de uso



Limite de temperatura (conservar a)



Não congelar



Calibrador



Risco biológico



Controle



Volume após a reconstituição



Controle Positivo



Conteúdo



Controle Negativo



Número de lote



Número de catálogo



Wiener lab.

2000 Rosario - Argentina